


Taubheit, Missempfinden
und Schmerzen in der
Hand deuten auf die
Erkrankung hin

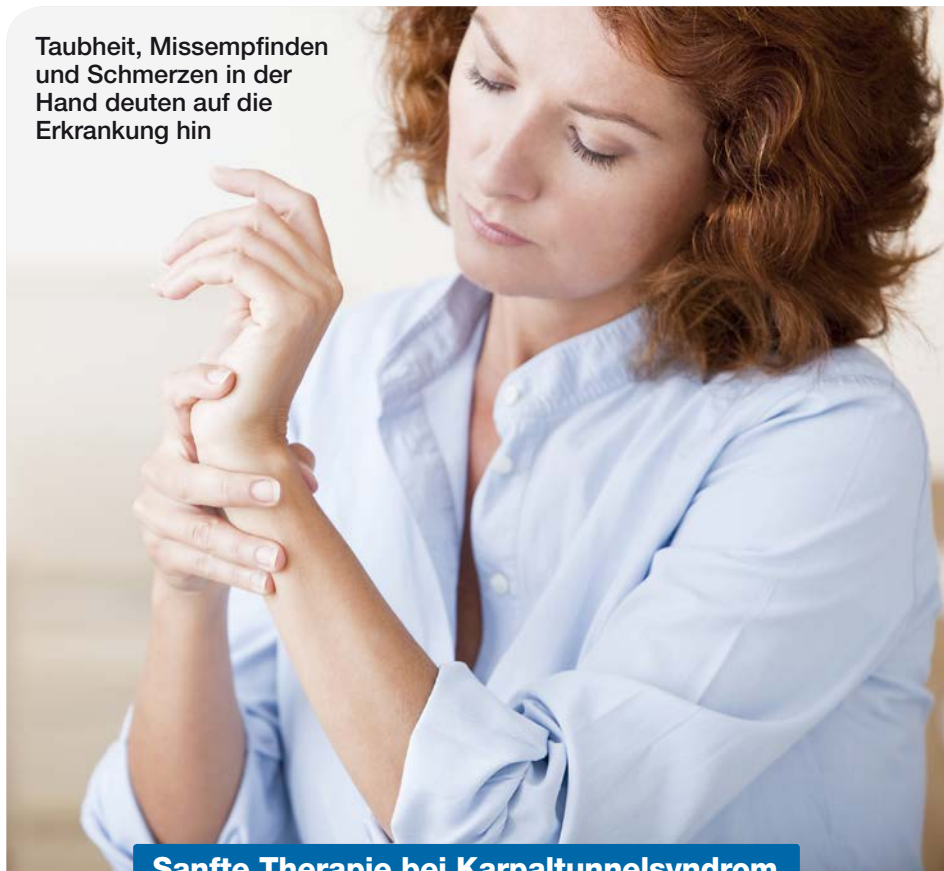

Sanfte Therapie bei Karpaltunnelsyndrom

Bestimmen Sie Ihre Größe



Größentabelle*

XS	S	M	L	XL	XXL
165	180	195	215	235	255
180	195	215	235	255	280

* alle Angaben
in Millimeter



Legen Sie das
Maßband um
Ihre Hand und
bestimmen Sie die
Größe Ihres *CarpaStretch*
aus der Tabelle.
Bei Grenzfällen wählen Sie bitte die größere
Ausführung. Diese Angaben sind für die
Bestellung (www.carpastretch.com) wichtig.

Dehnen statt operieren

Das Karpaltunnelsyndrom wird meist durch ungünstige Hand- und Handgelenkstellungen verursacht, die über längere Zeit vorliegen. Durch Entzündungen oder Größenzunahme erweiterte Sehnen drücken dann auf den Mediannerv.

Schwangerschaft, Diabetes, Fettleibigkeit, Schilddrüsenunterfunktion und Arthritis (Gelenkentzündungen) sind bekannte Risikofaktoren für das Karpaltunnelsyndrom. Es tritt ebenfalls als Folge von Handgelenkverletzungen, wie z. B. Knochenbrüchen auf. Als ultimative Maßnahme wird in der Regel eine Operation empfohlen, bei der mittels Durchtrennung des Karpalbandes mehr Platz im Karpaltunnel geschaffen wird. Sehnen und Bänder lassen sich aber auch durch Dehnung verlängern. Die Dehnung des Karpalbandes als

Form der Therapie wird inzwischen in vielen Publikationen erwähnt. Hier setzt *CarpaStretch*® mit einer neuartigen Dehnbandage an, für die ein europäisches Patent erteilt wurde.

Bei *CarpaStretch*® wird diese Dehnung erreicht durch seine elastischen Materialien, die sehr tragefreundlich sind und deshalb auch über längere Zeiträume benutzt werden können. Durch den Einsatz der Klebepads kann über den Klettverschluss eine optimale Kräfteinleitung erfolgen. Durch die leicht verstellbaren Klettverschlüsse lässt sich die Intensität individuell anpassen. Eine anfängliche Trainingszeit von max. eine Stunde pro Tag kann ab der zweiten Woche individuell erhöht werden. Erste Erfolge stellen sich oft schon nach kurzer Zeit ein. Patienten berichten, dass Sie bereits nach zwei

bis drei Wochen nachts wieder durchschlafen konnten.

Eine durchgeführte klinische Studie bestätigte die erfolgreiche Wirkung der *CarpaStretch*®-Dehnbandage. So konnte bei allen Patienten, welche *CarpaStretch*® benutzten, eine Operation vermieden werden. Verbesserungen zeigten sich bei den neurologischen Befunden, wie Erhöhung der Nervenleitgeschwindigkeit sowie Reduzierung der Pressung des Mediannervs durch eine signifikante Längung des Karpalbandes. Die vollständigen Ergebnisse der klinischen Studie können unter www.carpastretch.com eingesehen werden. ■

Ganz einfach bestellen unter:

www.carpastretch.com

Tel. 07841/209487